



Руководство по эксплуатации ложки Фолькмана

Ложка Фолькмана – одноразовый стерильный инструмент для забора материала с поверхности слизистых оболочек и кожи для бактериологических, цитологических и других исследований. Инструмент состоит из ручки, на противоположных концах которой размещены две рабочие части в виде ложек, отличающиеся по размерам.

ПОКАЗАНИЯ

Забор материала для бактериологических, цитологических и других исследований в гинекологии и урологии.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не имеется.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Недопустимо повторное применение инструмента. Недопустимо применение инструмента при нарушении целостности потребительской (конечной) упаковки. Недопустимо применение инструмента при превышении срока годности, указанного на упаковке.


Необходимо соблюдение особой осторожности в случае беременности пациентки. Применять ложку Фолькмана необходимо непосредственно после извлечения из конечной упаковки. Ложку Фолькмана должен применять только квалифицированный медицинский персонал.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ

Забор материала ложкой Фолькмана должен выполняться с соблюдением общепринятых правил асептики.

Рекомендуемый порядок применения

1. Вскрыть потребительскую (конечную) упаковку и извлечь инструмент.
2. Не прилагая значительного усилия, легкими скользящими движениями выполнить забор материала.
3. Собранный на рабочих частях ложки Фолькмана материал перенести на предметное стекло или поместить в среду для микробиологических исследований.
4. Использованный инструмент после дезинфекции подлежит утилизации.

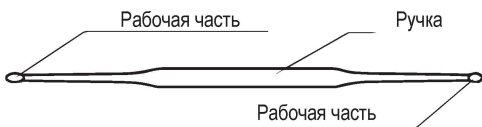

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:



Медицинское предприятие

Симург

www.simurg-mp.com

ЗАО "Медицинское предприятие Симург"
пр-т Людникова, 13-413, г. Витебск,
Республика Беларусь, 210023
тел.: +375 (212) 62-32-33

АДРЕС, КОНТАКТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ОТВЕЧАЮЩЕГО ЗА КАЧЕСТВО В РФ:

ООО "Медицинское предприятие "Симург",
РФ, 199178, г. Санкт-Петербург, линия 18-я В.О., дом 29,
литер 3, офис А 417, тел.: +7(812) 332-91-70